

# ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS DE VIROLOGIE

## MILIEU DE TRANSPORT


A utiliser pour tout prélèvement destiné à la CULTURE.

Il est disponible à la Réception Centrale des Analyses (Laboratoires). Dans les services cliniques, il doit être conservé congelé, et décongelé au moment de son utilisation.

Durée de péremption : 1 an

Deux présentations existent :


### En tube

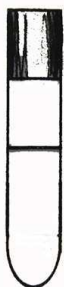

Pour :

- écouvillons (peau, gorge ...)
- sécrétions naso-pharyngées
- biopsies

### En pot

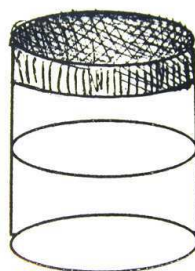

Pour :

- urines
- Lavages Broncho-Alvéolaires
- Liquides amniotiques

## TRANSPORT

*Tout prélèvement doit être acheminé immédiatement au laboratoire*

+++

En cas d'envoi différé, conserver le prélèvement le moins longtemps possible, selon les indications suivantes :

NATURE	TEMPERATURE
LCR (PCR)	Congélation si possible Sinon : 4°
TOUT PRELEVEMENT POUR CULTURE : écouvillons, sécrétions, liquides, urines, biopsies, selles	Congélation si possible Sinon : 4°
SANG HEPARINE (virémie)	Conservation impossible
SANG TUBE SEC (sérologie)	t° ambiante
SANG EDTA (PCR)	t° ambiante